

**WHAT** Opal 是什麼？

Opal™ 是一項全新的卵子品質檢測技術，能為每顆卵子進行清楚分級，協助評估是否需要增加取卵次數。

相較之下，傳統臨床評估卵子品質的方法，通常只能依賴外觀觀察。

Opal 輕微吸取卵子後，分析其即時反應，進一步評估卵子的品質，提供得出更準確且客觀的結果。

- 有助於辨識較具發育潛力的卵子
- 協助您做出更明智的生育決策
- 無需額外操作，即可獲得更詳細、客觀的評估結果

## FAQs

**Q: Opal 檢測會改變我的試管療程或凍卵流程嗎？**

A: 不會。Opal 檢測不會改變您的治療流程，也不需要您進行任何額外的操作。醫療團隊會在實驗室使用此技術，以獲得更多關於卵子的資訊。

**Q: Opal 檢測會影響或傷害我的卵子嗎？**

A: 不會。Opal 透過謹慎的評估流程分析每一顆卵子，不會對卵子造成傷害。整個檢測過程僅需數秒鐘，且全程由專業胚胎師操作。

**Q: Opal 檢測能保證更好的結果嗎？**

A: 沒有任何檢測能保證結果。Opal 檢測提供更完整的資訊，幫助醫療團隊更了解卵子品質，並與您共同做出更明智的治療決策。然而，成功懷孕仍受多種因素共同影響。

**Q: Opal 檢測適用於凍卵、試管療程還是兩者都適用呢？**

A: 兩者都適用。Opal 檢測可應用於：  
- 凍卵療程 — 協助規劃是否需要增加取卵次數，提升獲得優質囊胚的機會  
- 試管療程 — 無論是新鮮卵子或先前凍存的卵子，都可在受精前進行檢測，以提供更多關於卵子品質的資訊。

**Q: 為什麼我先前沒聽過這種評估卵子品質的方法呢？**

A: 過去临床上主要仰賴卵子的外觀進行品質評估。Opal 是一種全新的評估方法，能提供更客觀且更完整的卵子品質資訊，協助醫療團隊制訂更個人化，也更有依據的療程決策。

# Opal

全球首創卵子品質檢測系統



Opal

inti  
LABS

CONTACT US  
info@intilabs.com  
intilabs.com  
@inti\_labs



inti  
LABS

## HOW

Opal 如何運作 - 簡單且安全

Opal 透過謹慎的評估流程，為每一顆卵子進行分析，每顆卵子的評估只需數秒鐘即可完成。

Opal 會觀察卵子的外觀，並評估其對輕柔吸取的即時反應，綜合這些資訊，將卵子分級為A、B或C，協助助您與您的醫療團隊更全面地了解卵子品質。

- 無需接受任何額外醫療程序
- 不會對卵子造成損傷
- 全程由受過專業訓練的胚胎師操作

### 解讀您的Opal 檢測結果

Opal 根據卵子的測量特性，評為 A、B 或 C 級。

**A 級卵子:** 形成囊胚的可能性最高。

**B 級卵子:** 卵子形成囊胚的可能性略低。

**C 級卵子:** 其特徵顯示，相較於A 級和B級卵子，發育為囊胚的可能性較低。



Opal 會提供詳細的卵子檢測報告，協助您更了解卵子的品質狀況。

您的醫生也會與您一起解讀檢測結果，討論後續的生育規劃。

## WHEN

何時需要Opal


### 冷凍卵子

Opal 可在卵子凍存前為卵子進行分級，協助評估是否需要增加取卵次數，以提高獲得優質囊胚的機會。胚胎師會在取卵後，立即進行檢測為卵子分級，讓您在未來使用時擁有更多信心與選擇。



### 試管療程

Opal 檢測可應用於先前凍存的卵子或新鮮取出的卵子，評估其是否適合進行試管療程。透過提供更完整的資訊，有助於醫師與您共同規畫後續的治療方向。

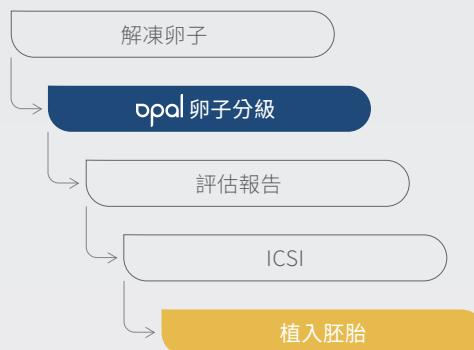


## WHO

誰適合 Opal ?

Opal 適用於希望在凍卵或試管療程前，獲得更完整資訊並更有信心規劃的族群。

透過客觀評估卵子的生育潛力——也就是卵子發育成健康囊胚的可能性，協助醫療團隊作出更合適的決策。

雖然更精準的卵子分析，對所有備孕家庭都可能有所幫助，但Opal 對以下族群的助益尤其明顯：

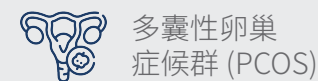

更清晰、更精準

